



Trocknungsgerät

für dentale Keramiken



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Trennen Sie das Gerät bei Beschädigungen unverzüglich von der Stromversorgung.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät darf nicht eingetaucht oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Das Gerät ist nur Trocknung von Keramiken vorgesehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anleitung resultieren. Produktänderungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

Beschreibung des Trocknungsprozesses

Eine vollständige Trocknung der eingefärbten Keramiken ist für ein gutes Ergebnis der Einfärbung und für den Schutz des Sinterofens zwingend erforderlich.

Empfohlene Trocknungszeiten:

- einzelne Kronen: mindestens 30 Minuten
- 2 bis 6 gliedrige Brücken: ca. 90 Minuten
- 7 bis 14 gliedrige Brücken: ca. 120 Minuten

Zeitanzeige
zeigt die Restlaufzeit im Timerbetrieb an

Leistungsstufen
Stufe I: ca. 270W
Stufe II: ca. 520W

Ein- und Ausschalten

Zeitvorwahl
in 30-Minuten-Schritten

Betrieb

1. Gerät einschalten
2. Laufzeit mit + oder - einstellen
3. Gerät schaltet nach abgelaufener Zeit ab

Wichtiger Hinweis

Bei laufendem Gerät muss der Deckel in die erhöhte Position gebracht werden. Gerät nach Gebrauch auskühlen lassen. Nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.

Technische Daten


Spannung 230 V AC / 50Hz
Leistung ≤ 520 W
Temperatur ≤ 80 °C
Abmessungen (D/H) 320 x 200 mm
Gewicht 1,8 kg

Made in EU



Hinweis

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät vor der eingestellten Zeit auszuschalten. Nach ca. 5 Sekunden erfolgt die Abschaltung.

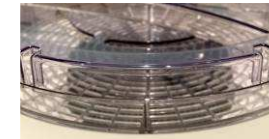

Thermo-Star GmbH
Krantzstr. 7 / Geb. 37
52070 Aachen, Deutschland

Phone +49 241 60845-0
Fax +49 241 60845-100
info@thermo-star.de
www.thermo-star.de

